

## Пользователям продукции Акку-Чек

Исх. № 20180614-исх-995 от 14 июня 2018 года

г. Москва

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» выражает Вам свое почтение и сообщает о следующих изменениях, касающихся тест-полосок Акку-Чек Актив.

При использовании глюкометров Акку-Чек Актив с гнездом для чипа активации в глюкометр необходимо вставить черный чип активации (333). **Черный чип активации(333) вставляется раз и навсегда и больше не меняется. Пожалуйста, не выкидывайте черные чипы вместе с использованной упаковкой тест-полосок, если Вы купили упаковку тест-полосок с черным чипом.**

В глюкометрах Акку-Чек Актив последнего поколения, поставляемых на рынок Российской Федерации в настоящий момент, не предусмотрено гнездо для черного чипа активации (зеленой кодовой пластинки). Нет необходимости использовать черный чип активации. Утилизируйте черный чип, если Вы купили упаковку тест-полосок с черным чипом.

Также сообщаем, что с июля 2018 года на территорию Российской Федерации будут поставляться тест-полоски Акку-Чек Актив №50 и №100 без черного чипа активации (333) в упаковке.

Для того, что бы получить черный чип активации (333) обратитесь в Консультационный центр в вашем регионе или в Информационный центр Акку-Чек по телефону: 8-800-200-88-99 (круглосуточно, звонок бесплатный из всех регионов России). Адреса Консультационных центров можно уточнить на сайте [www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru).

С уважением,  
**Руководитель отдела качества,  
регуляторных вопросов и комплаенс  
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»**

Исполнитель: Степанова Е.А., +7 (495) 229 69 95 (внут. 5865)



**Хайкина Н.О.**

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

ул. Летниковская, д. 2, стр. 2  
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»  
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95  
[www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru)

Roche Diabetes Care Rus LLC

2 Letnikovskaya Street, bldg. 2  
Business Center «Vivaldi Plaza»  
Moscow, 115114, Russia

Тел.: +7 (495) 229 69 95  
[www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru)