



Пользователям продукции «Акку-Чек»

Исх. № 20231204-исх-3380

12 апреля 2023 года

г. Москва

### Уведомление в отношении Глюкометра «Акку-Чек Перформа Комбо»

Настоящим ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» (далее – «Компания»), уполномоченный представитель Roche Diabetes Care GmbH, производителя медицинских изделий линейки Акку-Чек, выражает Вам свое почтение и сообщает следующее:

Roche Diabetes Care GmbH (далее – «Производитель») поддерживает высочайшие стандарты качества продукции и информирует пользователей о дополнительной информации для пользователей Глюкометра «Акку-Чек Перформа Комбо»:

1. Внимательно осмотрите тубус с тест-полосками перед первым использованием тест-полосок. Если вы заметили какие-либо повреждения тубуса, если что-то мешает полному закрытию крышки, или вы заметили, что тубус был открыт перед первым использованием, не используйте тест-полоски. Не проводите контрольное измерение. Обратитесь в Информационный центр. Поврежденные тест-полоски могут привести к неправильным результатам, что в свою очередь может повлечь за собой неправильное лечение.
2. Контрольные измерения НЕ следует выполнять, если тубус с тест-полосками оставался открытым.
3. Следите за тем, чтобы после сопряжения глюкометр и помпа всегда находились под вашим контролем.
4. Не устанавливайте сопряжение между глюкометром и помпой в общественных местах.
5. Внимательно следите за уровнем глюкозы крови.
6. Не подключайтесь к каким-либо сторонним устройствам и не используйте

**ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»** ул. Летниковская, д. 2, стр. 2  
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»  
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95  
[www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru)

**Roche Diabetes Care Rus LLC** 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2  
Business Center «Vivaldi Plaza»  
Moscow, 115114, Russia

Тел.: +7 (495) 229 69 95  
[www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru)



программное обеспечение, не авторизованное компанией Roche.

7. Если вы подозреваете, что настройки помпы или параметры введения инсулина неожиданно изменились, немедленно отмените все незапланированные болюсы и обратитесь к своему лечащему врачу.

С уважением,  
Портфолио лидер  
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»  
Исп. Дедова О.  
+ 7 (495) 229 69 95



Шустова Е.М.

**ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»** ул. Летниковская, д. 2, стр. 2  
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»  
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95  
[www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru)

**Roche Diabetes Care Rus LLC** 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2  
Business Center «Vivaldi Plaza»  
Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95  
[www.accu-chek.ru](http://www.accu-chek.ru)